

# Zde přilepit díl 2

šipky k sobě

šipky k sobě

- 1 Ohněte měřidlo podle vyznačené čáry
- 2 Ohnutou část přiložte ke zdi
- 3 Postavte chodidlo na měřidlo, patou ke zdi. Přeneste váhu na měřenou nohu.
- 4 Velikost boty odečtěte na špičce nejdelšího prstu.
- 5 Změřte druhé chodidlo. Výsledky porovnejte. Větší z nich určuje správnou velikost boty.

1

3

2

Zde ohnout!


SHAPER



Měření velikosti obuvi!

www.diabota.cz

SHAPER

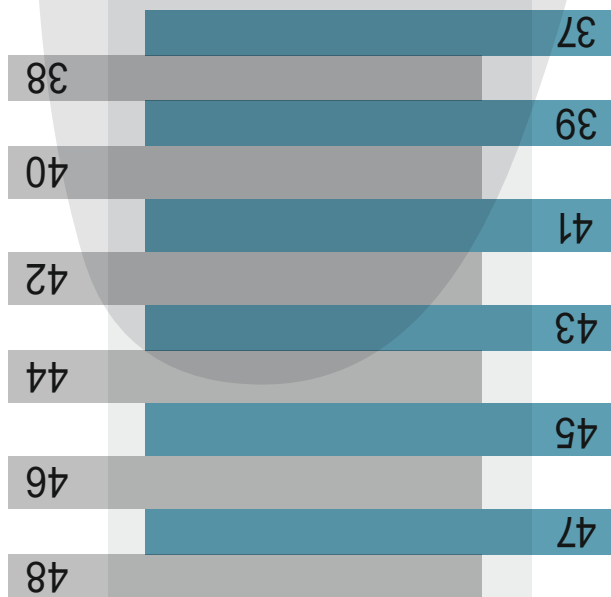

Při tisku nastavte velikost na 100%!!

Po vytištění měřítkem překontrolujte správnou délku proužku.

