

schülke -+



Tekutý alkoholový přípravek, určený k rychlé dezinfekci a čištění povrchů zdravotnických prostředků

desam[®] spray

Naše Plus

- Okamžitě k použití
- Zaručuje rychlý dezinfekční efekt
- Vhodný k dezinfekci špatně dostupných míst
- Dobrá materiálová snášenlivost
- Kompatibilní s utěrkami wettask a schülke wipes

Oblast použití

desam[®] spray je vhodný k rychlé dezinfekci zdravotnických prostředků. Obzvláště vhodné pro oblasti se zvýšeným infekčním rizikem. Přípravek je vhodný všude tam, kde je potřeba rychle a zároveň účinně dezinfikovat.

Účinnost

Baktericidní, virucidní, mykobaktericidní, tuberkulocidní, fungicidní, levurocidní

Pro získání více informací o mikrobiologické účinnosti a expoziční době kontaktujte zástupce společnosti Schülke.

Návod na použití

desam[®] spray se neředí a aplikuje se koncentrovaný pomocí postřiku, případně otěru. Dbejte na rovnoměrné nanesení přípravku (rozetřít utěrkou) a nechte jej působit po dobu expozice, přebytečné množství tekutiny otřete po uplynutí doby expozice jednorázovou utěrkou. Nevhodný na materiály citlivé na alkohol (plexisklo, akryláty, makrolon, guma, měkčené PVC, lakované povrchy). Není určen pro dezinfekci invazivních zdravotnických prostředků.

CE 1023



Složení

100 g přípravku **desam[®] spray** obsahuje následující účinné látky:

- 45 g Ethanol
- 30 g Isopropanol
- 0,025 g Didecyldimethylammonium chloride

Zvláštní upozornění

Určeno pro profesionální trh. Nemíchejte s jinými produkty. Termoelektrické přístroje používejte až po úplném zaschnutí přípravku. Vysoce hořlavá kapalina a páry. Nevdechujte aerosol. Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným plamenem a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření. Skladovat v uzavřených obalech, mimo zdrojů sálavého tepla, ohně a přímého slunečního záření. Teplota skladování: -10 až +25 °C.

Objednávkové informace

Název produktu	Balení	Číslo výrobku
desam spray CZ/SK 500 ml	20/Karton	70002789
desam spray PL 1 l	12/Karton	70002790
desam spray CZ/SK/PL 5 l	1/Kanistr	70002792



Životní prostředí

Společnost schülke své produkty vyrábí inovativními a bezpečnými postupy šetrnými k životnímu prostředí, hospodárně a za dodržení vysokých standardů kvality. Společnost Schulke CZ, s.r.o. je držitelem certifikátů ISO 13485 a ISO 9001.

Typ přípravku

Zdravotnický prostředek tř. IIa



Společnost Schülke & Mayr GmbH je držitelem oprávnění výrobce podle § 13 odst. 1 německého zákona o léčivých přípravcích a certifikátů o dodržování GMP pro léčivé přípravky.

Výrobce
Schulke CZ, s.r.o.
Lidická 445
735 81 Bohumín
Česká republika
tel.: +420 558 320 260
www.schulke.cz
schulkecz@schuelke.com