







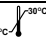





d,l -Bromfeniramin	fenoprofen	d,l -oktopamin	Thioridazin
Kofein	furosemid	Kyselina šťavelová	d,l -tyrosin
Cannabidiol	Kyselina gentisová	Kyselina oxolinová	tolbutamid
Chloralhydrát	Hemoglobin	Oxymetazolin	triamteren
chlormfenikol	Hydralazin	Papaverin	trifluoperazin
Chlorthiazid	hydrochlorothiazid	Penicilin-G	trimethoprim
d,l -chlorfeniramin	Hydrokortison	Perfenazin	d,l -tryptofan
Chlorpromazin	kyselina o-hydroxyhippurová	Fenelzin	Kyselina močová
Cholesterol	3-Hydroxytyramin	Prednison	verapamil
klonidin	d,l -isoproterenol	d,l -propranolol	Zomepirac



#### REFERENCE

1. Tietz NW. Učebnice klinické chemie. Společnost WB Saunders. 1986; 1735
2. Baselt RC. Dispozice toxických multidrog a chemikálií u člověka. 2nd Ed. Biomedical Publ., Davis, CA. 1982; 488
3. Hawks RL, CN Chiang. Testování moči na zneužívání drog. Národní institut pro zneužívání drog (NIDA), výzkumná monografie 73, 1986

#### REJSTRÍK SYMBOLŮ

	Přečtěte si návod k použití		Spotřebujte do		Obsahuje dostatek pro <n> testy
	pro diagnostické použití <i>in vitro</i>		Číslo šarže		Katalogové číslo
	Omezení skladovací teploty		Výrobce		Nepoužívejte znovu
	Zplnomocněný zástupce				

**VivaChek**  
**VivaChek Biotech (Hangzhou) Co., Ltd.**  Lotus NL B.V.  
 Level 2, Block 2, 146 East Chaofeng Rd., Koningin Julianaplein 10, 1e Verd,  
 Yuhang Economy Development Zone, Hangzhou, 311100, China 2595AA, The Hague, Netherlands.  
 Email: info@vivachek.com Tel: +316444168999  
 www.vivachek.com Email: peter@lotusnl.com

Datum účinnosti: 2023-06-19

Číslo: 1624023101

#### DISTRIBUTOR PRO ČR:

**CZECH ORIGINAL PRODUCTS s.r.o.**  
 Koulova 6, Praha 6, 160 00  
 IČ: 08595771, DIČ: CZ08595771

www.joymed.cz  
 obchod@joymed.cz  
 +420 608 284 065