












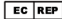
Atropin	Ethyl-p-aminobenzoát	Niacinamid	3-acetát
Kyselina benzinová	p -estradiol	nifedipin	Tetrahydrokortison
Kyselina benzoová	Estron-3-sulfát	Norethindron	tetrahydrozolin
Bilirubin	Erythromycin	Noskapin	Thiamin
d,l-bromfeniramin	fenoprofen	d,l-oktopamin	Thioridazin
Kofein	furosemid	Kyselina šřavelová	d,l-tyrosin
Cannabidiol	Kyselina gentisová	Kyselina oxolinová	tolbutamid
Chloralhydrát	Hemoglobin	Oxymetazolin	triamteren
chloramfenikol	Hydralazin	Papaverin	trifluoperazin
Chlorthiazid	hydrochlorothiazid	Penicilin-G	trimethoprim
d,l-chlorfeniramin	Hydrokortison	Perfenazin	d,l-tryptofan
Chlorpromazin	kyselina o-hydroxyhippurová	Fenelzin	Kyselina močová
Cholesterol	3-Hydroxytyramin	Prednison	verapamil
klonidin	d,l-isoproterenol	d,l-propranolol	Zomepirac

REFERENCE


1. Tietz NW. Učebnice klinické chemie. Společnost WB Saunders. 1986; 1735
2. Baselt RC. Dispozice toxických multidrog a chemikálií u člověka. 2nd Ed. Biomedical Publ., Davis, CA. 1982; 488
3. Hawks RL, CN Chiang. Testování moči na zneužívání drog. Národní institut pro zneužívání drog (NIDA), výzkumná monografie 73, 1986

REJSTRÍK SYMBOLŮ

	Přečtěte si návod k použití		Spotřebujte do		Obsahuje dostatek pro <n> testy
	pro diagnostické použití <i>in vitro</i>		Číslo šarže		Katalogové číslo
	Omezení skladovací teploty		Výrobce		Nepoužívejte znovu
	Zplnomocněný zástupce				


VivaChek Biotech (Hangzhou) Co., Ltd.  Lotus NL B.V.
 Level 2, Block 2, 146 East Chaofeng Rd.,
 Yuhang Economy Development Zone,
 Hangzhou, 311100, China
 Email: info@vivachek.com
 www.vivachek.com

Koningin Julianaplein 10, 1e Verd,
 2595AA, The Hague, Netherlands.
 Tel: +31644168999
 Email: peter@lotusnl.com




Číslo: 1624022801
Datum účinnosti : 08.07.2023

DISTRIBUTOR PRO ČR:

CZECH ORIGINAL PRODUCTS s.r.o.
 Koulova 6, Praha 6, 160 00
 IČ: 08595771, DIČ: CZ08595771

www.joymed.cz
 obchod@joymed.cz
 +420 608 284 065